

Information Produit: Biberon de conservation du lait maternel

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Biberon de conservation du lait maternel

Usage

- 1 Conçu pour la conservation du lait maternel.

Compatible avec :

- Tire-laits s'adaptant aux biberons de diamètre standard.
- Toutes les tétines Similac®.
- Bouchon distributeur Volu-Feed®.



Caractéristiques

- 1 Biberon de plastique (polypropylène) de 118 mL avec bouchon (3 biberons par emballage).
- 1 Prêt à utiliser.
- 1 Jetable ou réutilisable*.
- 1 Va au congélateur.
- 1 Va au lave-vaisselle (panier du haut seulement).

* Si l'établissement décide de réutiliser les biberons, suivre les directives de Santé Canada pour les stériliser.

Présentation

Numéro De Référence	Item
51950	Biberon de conservation du lait maternel; 3 biberons avec bouchons/emballage; 48 emballages/caisse.

Preparation

Mode d'emploi :

Les biberons sont prêts à utiliser et n'ont pas besoin d'être stérilisés avant leur première utilisation.

Première utilisation :

1. Se laver les mains et retirer le biberon de son emballage.
2. Dévisser le bouchon du biberon et le remettre dans l'emballage, pour pouvoir l'utiliser plus tard.
3. Visser le biberon au tire-lait et exprimer votre lait, en ne remplissant pas complètement le biberon, car le lait prendra de l'expansion une fois congelé.
4. Dévisser ensuite le biberon du tire-lait et revisser le bouchon.
5. Indiquer sur le biberon votre nom, la date et l'heure.
6. Les biberons remplis doivent être réfrigérés ou congelés immédiatement et utilisés selon les directives de votre professionnel de la santé.

Après la première utilisation :

1. Laver les biberons et les bouchons dans de l'eau chaude savonneuse et bien les rincer; ou les laver au lave-vaisselle, dans le panier du haut.
2. Votre professionnel de la santé pourrait vous recommander de stériliser les biberons avant de les remplir de lait maternel.

Conseils utiles :

- 1 Rincer le biberon et le bouchon après chaque utilisation afin que le lait ne colle pas au biberon.
- 1 Pour décongeler le lait maternel, passer le biberon sous l'eau tiède du robinet.
- 1 Donner le lait maternel décongelé sans tarder ou le réfrigérer; ne pas recongeler.
- 1 **MISE EN GARDE** : Ne jamais décongeler ou chauffer le lait au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca